



CODAN

Check Valves

Das vielseitige Rückschlagventil Programm

The decisive connection



CODAN

Check Valves



Klein, perfekt und sicher

Spitzentechnik im Miniformat

In den CODAN Check Valves steckt wie bei allen CODAN Produkten jahrzehntelange Erfahrung aus Forschung und Entwicklung.


Die Präzision in der Fertigung sorgt für höchste Zuverlässigkeit und Leichtgängigkeit des CODAN Check Valves. Der Ventilkörper ist in Ruhestellung geschlossen und öffnet selbsttätig bereits bei einem geringen Förderdruck. Er schließt automatisch, sobald ein Gegendruck entsteht oder der Förderdruck abgebaut ist. Selbst hochviskose Infusionen passieren die Ventile sicher und zuverlässig.

Die CODAN Check Valves zeichnen sich durch ein besonders geringes Primingvolumen von 0,15 ml aus und sind problemlos in alle Infusionssysteme integrierbar.

Ob in der Standard Infusionstherapie auf der Station, im OP, auf der Intensivstation oder in der Anästhesie - in allen Bereichen des klinischen Alltags kommen die CODAN Check Valves zum Einsatz.

Integrierte Sicherheit

Ein kleines Detail von größter Wichtigkeit für die Patientensicherheit sind die CODAN Check Valves. Als fester oder optionaler Bestandteil in unterschiedlichen CODAN Produkten verhindern die Rückschlagventile zuverlässig ohne zusätzlichen Aufwand den Rückfluss bzw. die Rückförderung von Infusionsflüssigkeiten ebenso, wie auch den patientenseitigen Rückfluss von Blut in das Infusionssystem.

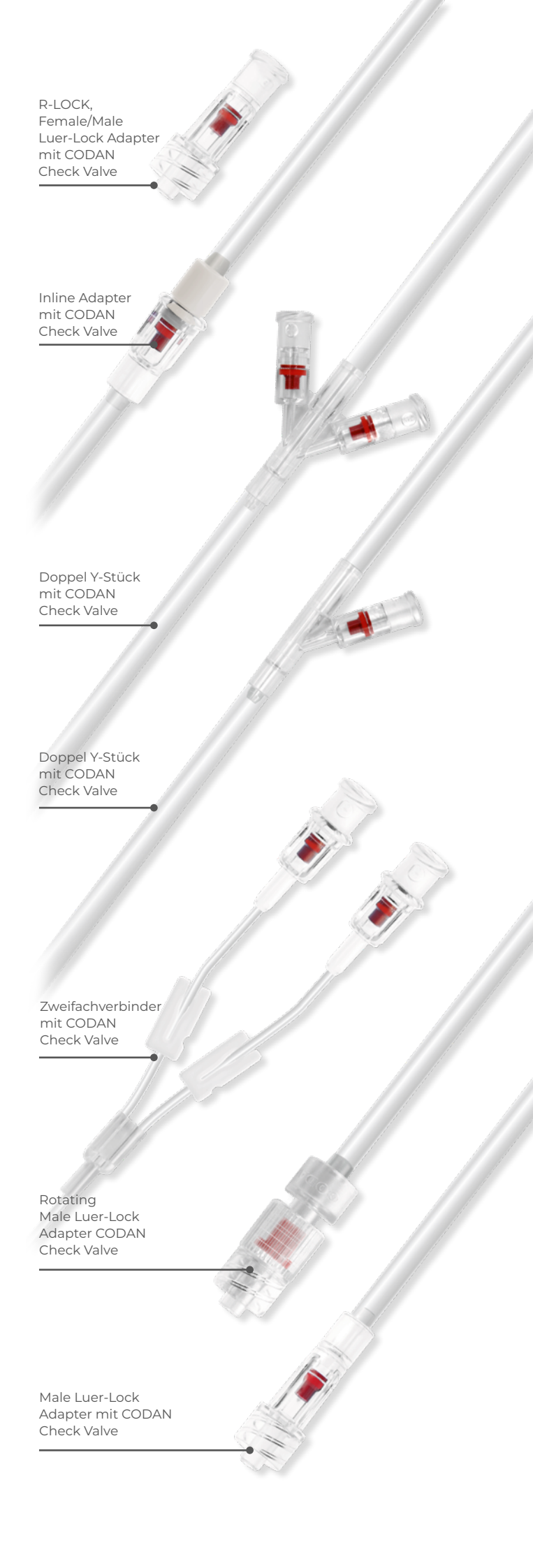

R-LOCK,
Female/Male
Luer-Lock Adapter
mit CODAN
Check Valve

Inline Adapter
mit CODAN
Check Valve

Doppel Y-Stück
mit CODAN
Check Valve

Doppel Y-Stück
mit CODAN
Check Valve

Zweifachverbinder
mit CODAN
Check Valve

Rotating
Male Luer-Lock
Adapter CODAN
Check Valve

Male Luer-Lock
Adapter mit CODAN
Check Valve

Vielseitigkeit mit Präzision

In vielen Varianten einsetzbar

Für jeden Anwendungsfall findet sich die passende Lösung. Das Rückschlagventil kann als Einzelkomponente in ein bestehendes System integriert werden. Außerdem steht eine Vielzahl von Anschlusssets, Verlängerungen, Konnektoren, komplett konfektionierten Systemen und Spezialsystemen mit Rückschlagventilen zur Verfügung. Alle Varianten sind in verschiedenen Schlauchdurchmessern verfügbar. Konnektoren mit Rückschlagventil sind als 2-, 3- oder 4-fach Verbinder erhältlich.

Verbindungen

Rückschlagventile in den Anschlüssen der CODAN Infusionsgeräte machen die Handhabung besonders einfach und sicher - je weniger Einzelkomponenten eingesetzt werden, desto schneller und zuverlässiger kann die Infusion vorbereitet und verabreicht werden. Eine besondere Bedeutung erhält die Y-Zuspritzung mit CODAN Check Valve bei der sicheren und risikoarmen Verabreichung von Zytostatika.

Anschlussvarianten

Besonders komfortabel und anwenderfreundlich sind die mit einem drehbaren Male Luer-Lock Adapter ausgestatteten Anschlüsse, die ein sicheres Verschließen des Luer-Locks ohne Schlauchtorsion ermöglichen. Selbstverständlich bietet CODAN auch alle Standard Infusionsgeräte mit integrierten Rückschlagventilen an.

CODAN weltweit

CODAN ist international bekannt als Hersteller und Lieferant von medizinischen Übertragungssystemen. Bei den CODAN Companies sind weltweit über 1500 Mitarbeitende beschäftigt.

Der Name CODAN steht für Zuverlässigkeit, Qualität und Präzision - dafür sorgen das Know-How und die Erfahrung aus über 60 Jahren Forschung und Entwicklung. Eigene Produktionsstätten und Vertriebsfirmen weltweit garantieren eine effiziente Produktion, ein dichtes Vertriebsnetz und einen erstklassigen Service für unsere Kunden im Gesundheitswesen.

CODAN Produktpalette

- Infusionssets
- Transfusionssets
- Verlängerungen & Mehrfachverbinder
- Zubehör für Infusion und Transfusion
- Infusionsfilter & Filtersysteme
- Produkte für die Neonatologie und Pädiatrie
- Entnahme-, Zubereitungs- und Verabreichungssysteme
- CODAN CYTO®
- Chemoprotect® Produkte
- Produkte für Urologie und Gynäkologie
- Einmalspritzen
- Invasive Blutdruckmessung
- Infusionstechnologie-Lösungen
- Volumetrische Infusionspumpen & Spritzenpumpen
- Software
- CODAN COMPONENTS

CODAN Companies

CODAN Medizinische Geräte GmbH · Deutschland
CODAN pvb Critical Care GmbH · Deutschland
CODAN pvb Medical GmbH · Deutschland
CODAN TI, S.A. · Portugal
CODAN US Corporation · USA
CODAN Inc. · USA
CODAN NORGE AS · Norge
CODAN TRIPLUS AB · Sverige
CODAN Limited · United Kingdom
CODAN FRANCE Sarl · France
CODAN Medical AG · Schweiz
CODAN ARGUS AG · Schweiz
arcomed AG · Schweiz
CODAN BV · Nederland
CODAN s.r.l. · Italia
CODAN Medical GmbH · Österreich
CODAN Medical ApS · Danmark
CODAN DEHA ApS · Danmark
CODAN MEDITECH s.r.o. · Česká republika
arcomed Pty Ltd · Australia
arcomed Ltd · New Zealand

Die Übereinstimmung der vorhandenen Qualitätsmanagementsysteme mit den Vorschriften der Norm EN ISO 13485, der europäischen Richtlinie 93/42/EWG und/oder der Verordnung (EU) 2017/745 wurde von den jeweils zuständigen benannten Stellen zertifiziert:

TÜV SÜD Product Service GmbH

CODAN Medizinische Geräte GmbH
23738 Lensahn, Germany

CODAN pvb Critical Care GmbH
85661 Forstinning, Germany

CODAN US Corporation
Santa Ana, CA 92704, USA

CODAN ARGUS AG
6340 Baar, Switzerland

arcomed AG
8302 Kloten, Switzerland

Presafe Denmark A/S

CODAN Medical ApS
4970 Rødby, Denmark



Hersteller

CODAN Medizinische Geräte GmbH
Stig Husted-Andersen Straße 11
23738 Lensahn · DE
Tel.: +49 (0) 43 63 · 5111 · Fax: +49 (0) 43 63 · 5112 14
codan@codan.de
www.codancompanies.com

The decisive connection