



CODAN

Sistema DPT-6000

Precisione e versatilità nel monitoraggio
invasivo della pressione sanguigna

The decisive connection



CODAN

Sistema DPT-6000



La tecnologia microchip più moderna

converte i valori di pressione reali in segnali elettrici senza errori.

Il sistema di risciacquo integrato a doppia funzione

con flusso lineare permette il riempimento rapido e privo di bolle d'aria del set di monitoraggio della pressione.

Comprimendo le alette del sistema di risciacquo si genera un flusso elevato per un lavaggio rapido, mentre azionando il raccordo di attivazione si può controllare il comportamento di reazione del trasduttore. Se l'aumento della pressione (onda quadra) appare senza distorsioni sul monitor, il sistema di trasmissione (tubi) è stato correttamente spurgato dall'aria.



Versatilità nel monitoraggio invasivo della pressione sanguigna

I trasduttori della serie DPT-6000 presentano tutte le caratteristiche richieste dagli operatori ad un sistema per il monitoraggio della pressione sanguigna avanzato ed affidabile.


La maneggevolezza del sistema ed il design compatto ed ergonomico assicurano un impiego affidabile in tutte le circostanze.

Cavo del trasduttore senza PVC

con connettore e corpo del trasduttore "splash-proof"

Il raccordo luer sul lato posteriore


consente di collegare il tester per il trasduttore, permettendo così il controllo attivo del sistema di monitoraggio, senza compromettere la sterilità. Sul monitor il segnale del test appare invertito.

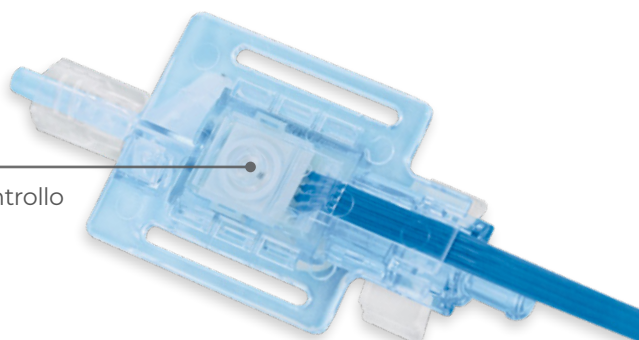

Vasta gamma di accessori del sistema

Cavi d'interfaccia per collegare il trasduttore al monitor

Questi cavi d'interfaccia sono personalizzati per adattarsi alle apparecchiature dell'ospedale. Sono dotati al lato del monitor del connettore corrispondente, mentre al lato del paziente, del connettore per il trasduttore.

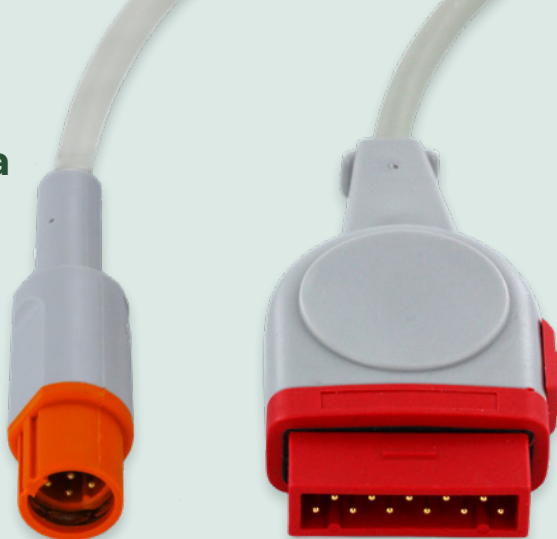

Sistema modulare di piastre di supporto

Questa piastra di supporto è realizzata espressamente per i trasduttori della serie DPT-6000. Tramite le guide laterali è possibile collegare le piastre le une con le altre in un sistema modulare. A seconda delle proprie esigenze, l'utente può collegare fra loro il numero desiderato di piastre di supporto. La piastra di supporto è realizzata in materiale plastico robusto e resistente. E' riutilizzabile e lavabile in lavastoviglie.

Nastro in velcro per fissare il trasduttore al braccio del paziente

In determinate circostanze può esistere l'esigenza di posizionare il trasduttore il più vicino possibile al sito di puntura. Il nastro in velcro può essere utilizzato per fissare il trasduttore direttamente al braccio del paziente, per cui possono essere utilizzate linee di monitoraggio molto corte.



CODAN Worldwide

CODAN è conosciuta a livello internazionale come fabbricante e fornitore di sistemi per la somministrazione di farmaci. Il gruppo CODAN impiega in tutto il mondo più di 1500 persone.

Il marchio CODAN è sinonimo di affidabilità, qualità e precisione, costruite sull'esperienza e il know-how acquisite in più di 60 anni di ricerca e sviluppo. Gli stabilimenti manifatturieri di proprietà e le unità commerciali dislocate nel mondo sono una garanzia di efficienza produttiva, di una rete di vendita consolidata e un servizio di prima qualità per i nostri clienti nel settore della tutela della salute.

Gamma di prodotti CODAN

- Set di infusione
- Set di trasfusione
- Linee di prolunga e connettori multipli
- Accessori per infusione e trasfusione
- Filtri per infusione e sistemi filtranti
- Prodotti per neonatologia e pediatria
- Sistemi di prelievo, preparazione e somministrazione
- CODAN CYTO®
- Prodotti Chemoprotect®
- Prodotti per urologia e ginecologia
- Siringhe monouso
- Monitoraggio invasivo della pressione sanguigna
- Soluzioni tecnologiche per l'infusione
- Pompe volumetriche e a siringa
- Software
- CODAN COMPONENTS

CODAN Companies

CODAN Medizinische Geräte GmbH · Deutschland
CODAN pvb Critical Care GmbH · Deutschland
CODAN pvb Medical GmbH · Deutschland
CODAN II, S.A. · Portugal
CODAN US Corporation · USA
CODAN Inc. · USA
CODAN NORGE AS · Norge
CODAN TRIPLUS AB · Sverige
CODAN Limited · United Kingdom
CODAN FRANCE Sarl · France
CODAN Medical AG · Schweiz
CODAN ARGUS AG · Schweiz
arcomed AG · Schweiz
CODAN BV · Nederland
CODAN s.r.l. · Italia
CODAN Medical GmbH · Österreich
CODAN Medical ApS · Danmark
CODAN DEHA ApS · Danmark
CODAN MEDITECH s.r.o. · Česká republika
arcomed Pty Ltd · Australia
arcomed Ltd · New Zealand

La conformità dei sistemi di gestione della qualità definiti con le disposizioni della norma EN ISO 13485, della Direttiva CEE 93/42 e/o del Regolamento (UE) 2017/745 è stata certificata dagli organismi notificati pertinenti e competenti:

TÜV SÜD Product Service GmbH

CODAN Medizinische Geräte GmbH
23738 Lensahn, Germany

CODAN pvb Critical Care GmbH
85661 Forstinning, Germany

CODAN US Corporation
Santa Ana, CA 92704, USA

CODAN ARGUS AG
6340 Baar, Switzerland

arcomed AG
8302 Kloten, Switzerland

Presafe Denmark A/S

CODAN Medical ApS
4970 Rødby, Denmark



Manufacturer

CODAN pvb Critical Care GmbH
Römerstraße 18
D-85661 Forstinning
Tel.: +49 (0) 81 21 · 98 02 0
codan@codanpvbccc.de
www.codancompanies.com

The decisive connection