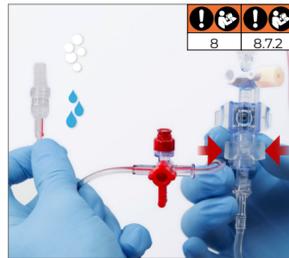
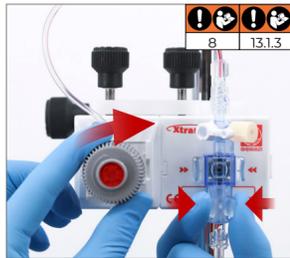
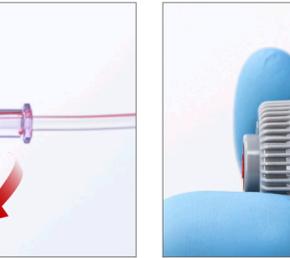
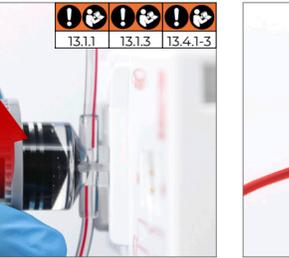
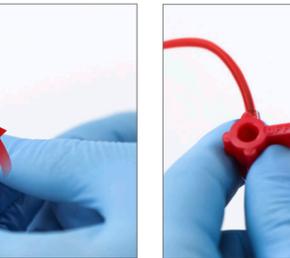


## I. Vorbereitung / Befüllung NBSS




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
Set	Reservoir	SWAN Switch
		
		
		
<b>1</b> Druckmess-Set befüllen.	<b>2</b> Während des Befüllens das Reservoir langsam um eine 3/4 Umdrehung (270°) aufdrehen und wieder zurückdrehen.	<b>3</b> SWAN Switch vollständig und blasenfrei befüllen.
		<b>4</b> SWAN Switch in Druckmess-Stellung bringen.

## II. Blutentnahme NBSS

\* Für die Anwendung sind **verriegelbare Luer-Lock Systeme** empfohlen. Bei der Verwendung von **Luer-Slip Systemen** ist darauf zu achten, dass sie sehr vorsichtig und **mit einer 90°-Drehung** am Seitenabgang angeschlossen werden.

			
<b>1</b> Entnahmestelle desinfizieren. Einwirkzeit beachten!	<b>2</b> SWAN Switch in Spül-Stellung bringen.	<b>3</b> Reservoir langsam durch Linksdrehung vollständig aufdrehen.	<b>4</b> Entnahmebehälter fest konnektieren.*
			
<b>5</b> SWAN Switch in Entnahme-Stellung bringen.*	<b>6</b> Aufziehen der Blutprobe.*	<b>7</b> SWAN Switch in Druckmess-Stellung bringen.*	<b>8</b> Entnahmebehälter dekonnektieren.*

## III. Reinfusion & Spülen

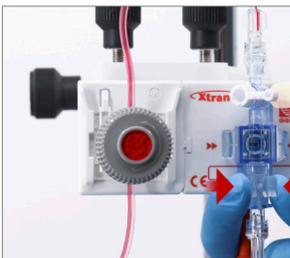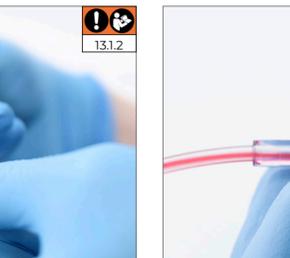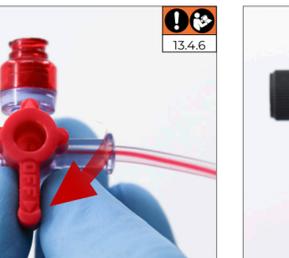				
<b>1</b> Reservoir langsam durch Rechtsdrehung vollständig zurückdrehen.	<b>2</b> NBSS spülen.	<b>3</b> Entnahmestelle desinfizieren.	<b>4</b> SWAN Switch in Spül-Stellung bringen.	<b>5</b> NBSS spülen.
				
<b>6</b> SWAN Switch in Druckmess-Stellung bringen.	<b>7</b> Kontrolle: Druckmessung & Anzeige am Monitor prüfen.			



Dieser Quick Guide informiert Sie über die wichtigsten Handlungsschritte und ersetzt nicht das Beachten der Gebrauchsanweisung. Beachten und befolgen Sie unbedingt die Informationen über den bestimmungsgemäßen Gebrauch sowie die Warn- und Sicherheitshinweise in der Gebrauchsanweisung. Die Hinweise in den Handlungsschritten beziehen sich auf das zugehörige Kapitel und die jeweiligen Warnhinweise in der Gebrauchsanweisung. Bei Nichtbeachten/-befolgen bestehen erhebliche Sicherheitsrisiken für den Patienten, Anwender und Dritte. Beachten Sie die Hygienerichtlinien Ihrer Einrichtung.