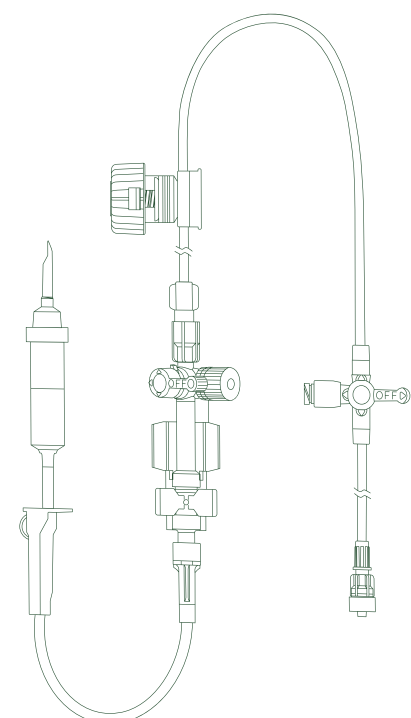
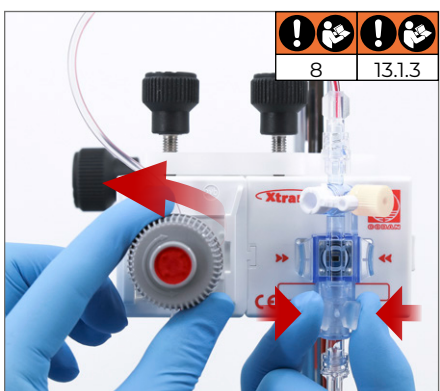


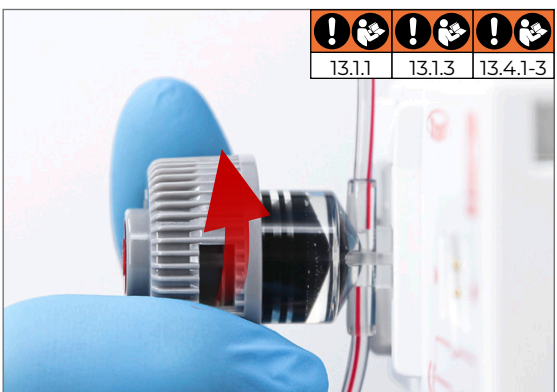


I. Priprema / punjenje sustava NBSS

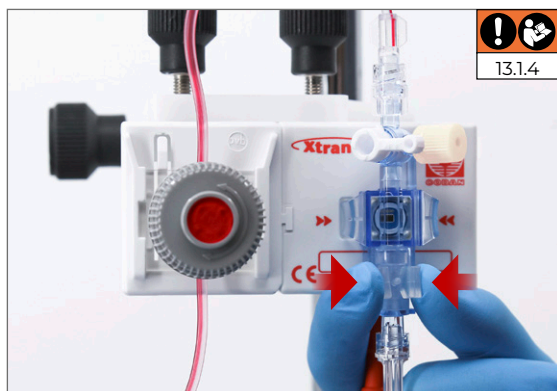
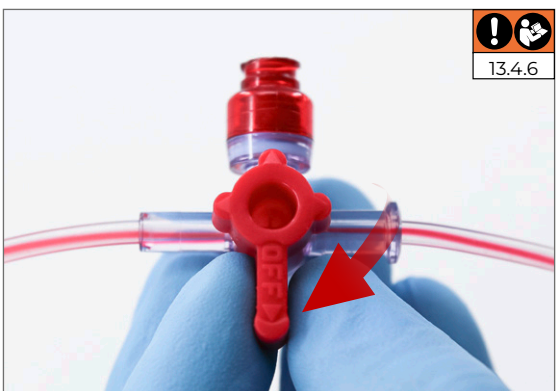
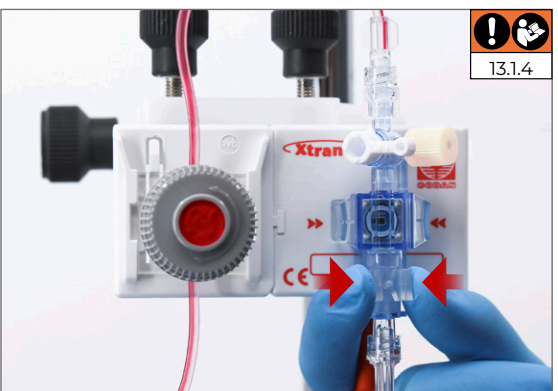
Set	Spremnik	SWAN Switch
 1 Napunite set za mjerenje tlaka.	 2 Tijekom punjenja spremnik polako odvrnite za 3/4 okreta (270°) i zatim ga ponovno vratite natrag.	 3 Töltse meg teljesen a SWAN Switch, és távolítsa el belőle a légbuborékokat.
		 4 Stavite SWAN Switch u položaj za mjerenje tlaka.

II. Uzimanje uzorka krvi NBSS

Za upotrebu se preporučuju **sustavi luer lock** koji se mogu zaključati. Pri upotrebi **sustava luer-slip** pazite na to da se oni spajaju na bočni odvojak vrlo pažljivo i uz **okretanje od 90°**.

 1 Stavite SWAN Switch u položaj za ispiranje.	 2 Spremnik polako odvrnite u cijelosti okretanjem ulijevo.	 3 Čvrsto spojite spremnik za uzorkovanje.	 4 Stavite SWAN Switch u položaj za uzimanje uzorka.
 5 Povucite uzorak krvi.	 6 Stavite SWAN Switch u položaj za mjerenje tlaka.	 7 Odspojite spremnik za uzimanje uzorka krvi.	 8 Dezinficirajte mjesto uzimanja uzorka. Obratite pozornost na vrijeme djelovanja!

III. Ponovna uspostava infuzije i ispiranje

 1 Spremnik polako vratite natrag u cijelosti okretanjem udesno.	 2 Isperite NBSS.	 3 Dezinficirajte mjesto uzimanja uzorka.	 4 Stavite SWAN Switch u položaj za ispiranje.	 5 Isperite NBSS.
 6 Stavite SWAN Switch u položaj za mjerenje tlaka.	 7 Kontrola: Provjerite mjerenje tlaka i prikaz na monitoru.			



Ove kratke upute („Quick Guide“) informirat će vas o najvažnijim koracima u postupanju i ne zamjenjuju poštovanje uputa za uporabu. Obavezno uvažite i primjenjujte informacije o namjenskoj uporabi kao i upozorenja te sigurnosne upute iz uputa za uporabu. Upute u koracima za postupanje odnose se na pripadajuće poglavlje i pojedina upozorenja iz uputa za uporabu. Ako se ne poštuju ili ne slijede upute, postoje značajni sigurnosni rizici za pacijenta, korisnika i treće osobe. Pridržavajte se higijenskih smjernica svoje ustanove.

