

CODAN

IBPM

DPT-6000


(DPT-6003 & DPT-6009)

DPT-9000/Xtrans®

(DPT-9003 & DPT-9009)

Quick Guide

Bloedafname **NBSS^{XL}** –
Needle-free Blood Sampling
System (6 ml)

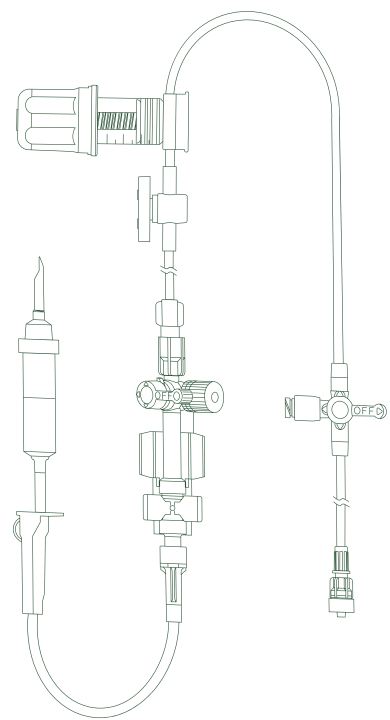

I. Voorbereiden / vullen met NBSS^{XL}

Set	Reservoir	SWAN Switch

II. Bloedafname NBSS^{XL}

Voor de toepassing worden vergrendelbare Luer-locksystemen aanbevolen. Bij gebruik van Luer-slipsystemen moet erop worden gelet dat deze heel voorzichtig en met een draai van 90° op de zij-uitgang worden aangesloten.

13.4.5

1 Zet de SWAN Switch in spoelstand. (6.1.4, 13.1.2)

2 Sluit de 1-wegkraan. (13.1.1, 13.1.3, 13.4.1-3)

3 Draai het reservoir langzaam helemaal open door naar links te draaien. (5.4.1, 13.4.4-5)

4 Sluit de afnamecontainer goed aan. (13.4.6)

5 Zet de SWAN Switch in afnamestand. (13.4.6)

6 Trek het bloedmonster op. (13.4.6)

7 Zet de SWAN Switch in drukmeetstand. (13.4.6)

8 Ontkoppel de afnamecontainer. (13.4.6)

9 Desinfecteer de afnameplek. Let op de inwerktijd!

III. Reïnfusie & spoelen

1 Draai het reservoir langzaam helemaal terug door naar rechts te draaien. (13.1.3, 13.5.3)

2 Open de 1-wegkraan. (13.1.2)

3 Desinfecteer de afnameplek. (13.4.6)

4 Zet de SWAN Switch in spoelstand. (13.1.4)

5 Spoel de NBSS^{XL}. (13.4.6)

6 Zet de SWAN Switch in drukmeetstand. (13.1.3, 13.4.3)

7 Draai het reservoir langzaam driekwartslag (270°) open door naar links te draaien en draai weer terug. (13.1.4)

8 Visuele controle: spoelen tot alle bloedresten zijn verwijderd. (13.1.4)

9 Spoel de NBSS^{XL}. (13.1.4)

10 Controle: controleer drukmeting & aanduiding op de monitor.



Deze Quick Guide informeert u over de belangrijkste handlingsstappen en is geen vervanging voor de inachtneming van de gebruiksaanwijzing. U dient de informatie over het beoogde gebruik evenals de waarschuwingen en veiligheidsaanwijzingen in de gebruiksaanwijzing absoluut in acht te nemen en op te volgen. De aanwijzingen in de handlingsstappen hebben betrekking op het bijbehorende hoofdstuk en de desbetreffende waarschuwingen in de gebruiksaanwijzing. Als deze aanwijzingen niet in acht genomen/opgevolgd worden, bestaan er aanzienlijke veiligheidsrisico's voor patiënten, gebruikers en derden. Neem goed nota van de hygiënevoorschriften van uw instelling.