

CODAN

IBPM

DPT-6000

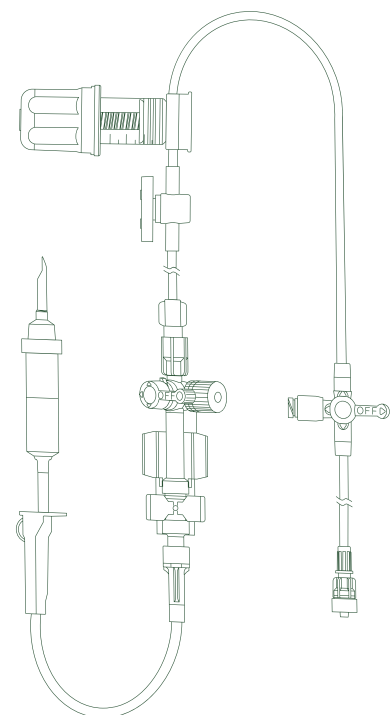
(DPT-6003 & DPT-6009)

DPT-9000/Xtrans®

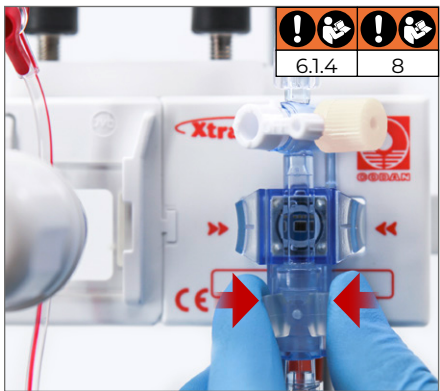
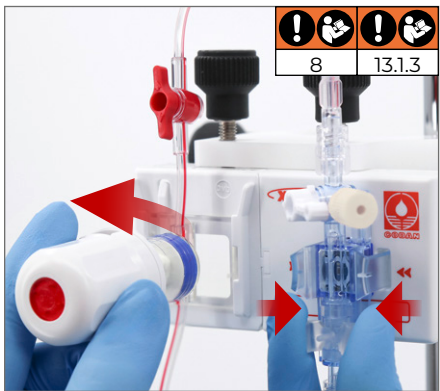
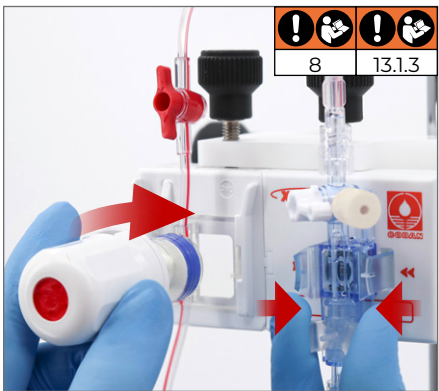
(DPT-9003 & DPT-9009)

Quick Guide

Blodprøvetagning NBSS^{XL} –
Needle-free Blood Sampling
System (6ml)



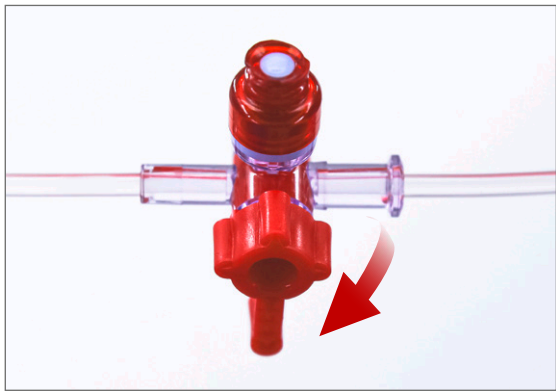
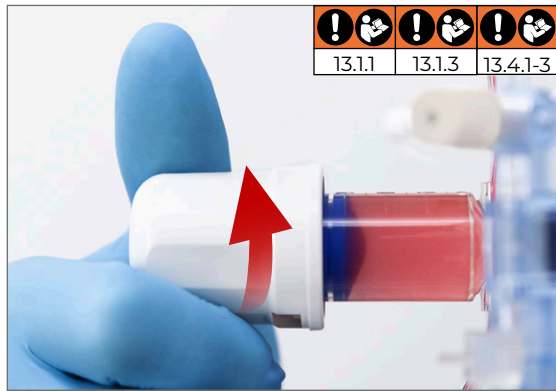
I. Klargøring / påfyldning NBSS^{XL}

Set	Reservoir	SWAN Switch
		
		
1 Påfyld trykmålesættet.	2 Under påfyldningen åbnes reservoiret langsomt 3/4-omdrejning (270°) og drejes tilbage igen.	3 Forfyld SWAN Switch fuldstændigt og fri for luftbobler.
		4 Placer SWAN Switch i trykmålingsposition.

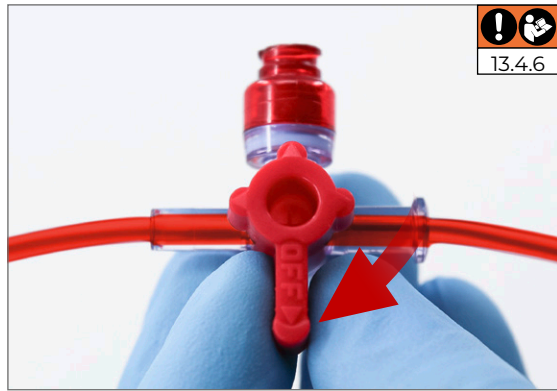
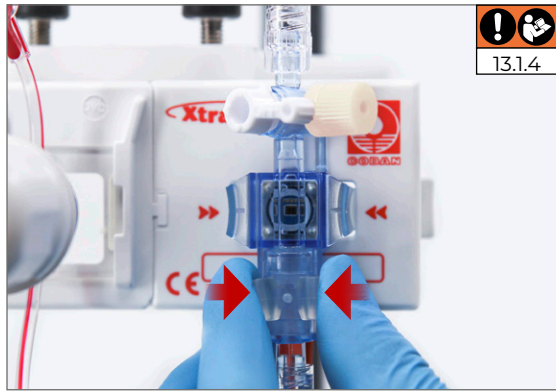
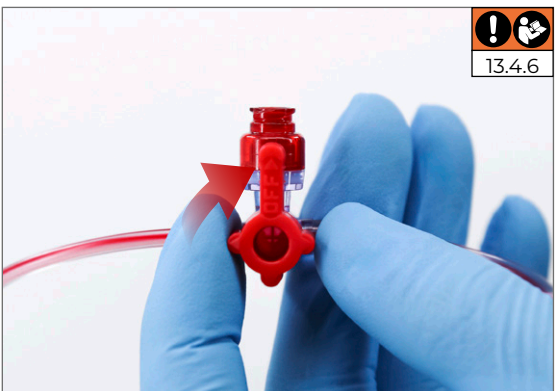
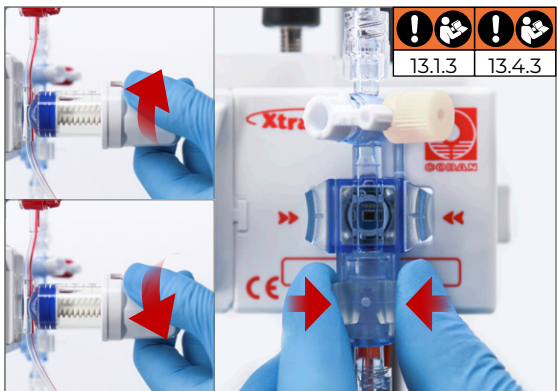
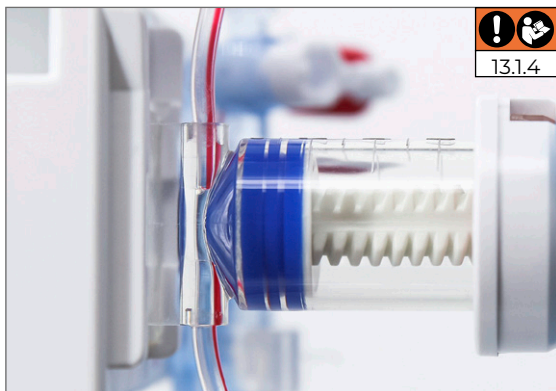
II. Blodprøvetagning NBSS^{XL}

Der anbefales brug af **Luer-Lock-systemer**, der kan låses. Ved brug af **Luer-Slip-systemer** skal man være opmærksom på, at de tilsluttes meget forsigtigt og med en **90°-drejning** på sideudgangen.

13.4.5

			
1 Placer SWAN Switch i skylleposition.	2 Luk 1-vejshanen.	3 Åbn reservoiret langsomt helt ved at dreje mod venstre.	4 Tilslut beholderen fast.
			
5 Placer SWAN Switch i prøvetagningsposition.	6 Optræk blodprøven.	7 Placer SWAN Switch i trykmålingsposition.	8 Frakobl beholderen.
			9 Desinficér prøvetagningsstedet. Overhold kontakttiden!

III. Reinfusion og skylning

				
1 Drej reservoiret langsomt helt tilbage ved at dreje mod højre.	2 Åbn 1-vejshanen.	3 Desinficér prøvetagningsstedet.	4 Placer SWAN Switch i skylleposition.	5 Skyl NBSS ^{XL} .
				
6 Placer SWAN Switch i trykmålingsposition.	7 Åbn reservoiret langsomt en 3/4-omdrejning (270°), og drej det tilbage.	8 Visuel kontrol: Skyl, indtil alle blodrester er fjernet.	9 Skyl NBSS ^{XL} .	10 Kontrol: Kontrollér trykmåling og visning på monitoren.



Denne Quick Guide informerer dig om de vigtigste handlingstrin og erstatter ikke overholdelsen af brugsanvisningen. Overhold og følg altid oplysningerne om den tilsigtede brug samt advarslerne og sikkerhedsanvisningerne i brugsanvisningen. Anvisningerne i handlingstrinnene refererer til det tilhørende kapitel og de pågældende advarsler i brugsanvisningen. Ved tilsidesættelse/overtrædelse er der alvorlige sikkerhedsrisici for patienten, brugeren og tredjemand. Overhold hygiejneretningslinjerne på dit hospital.



CODAN pvb Critical Care GmbH
Römerstraße 18, 85661 Forstinning, Germany
www.codancompanies.com

CH REP

CODAN Medical AG
Oberneuhofstrasse 10, 6340 Baar, Switzerland