

CODAN

IBPM

DPT-6000


(DPT-6003 & DPT-6009)

DPT-9000/Xtrans®

(DPT-9003 & DPT-9009)

Quick Guide

Blodprovstagning **NBSS^{XL}** –
Needle-free Blood Sampling
System (6ml)

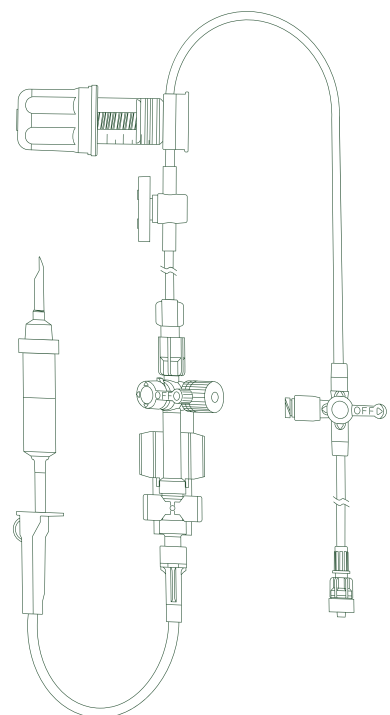

I. Förberedelse / påfyllning NBSS^{XL}

Set	Reservoar	SWAN Switch

II. Blodprovstagning NBSS^{XL}

För användningen rekommenderas låsbara **luer-locksystem**. Säkerställ vid användning av **luer-slipsystem** att dessa ansluts mycket försiktigt och **vridna 90°** vid sidoöppningen.

13.4.5

III. Återinfusion och spolning



Denna Quick Guide innehåller information om de viktigaste stegen och ersätter inte bruksanvisningen. Följ alltid all information om avsedd användning samt varnings- och säkerhetsanvisningarna i bruksanvisningen. Instruktionerna gäller tillhörande kapitel och respektive varningar i bruksanvisningen. Vid underlåtenhet att göra detta föreligger betydande säkerhetsrisker för patient, användare och tredje part. Beakta hygienriktlinjerna på din klinik.



CODAN pvb Critical Care GmbH
Römerstraße 18, 85661 Forstinning, Germany
www.codancompanies.com

CH REP

CODAN Medical AG
Oberneuhofstrasse 10, 6340 Baar, Switzerland