


I. Priprava / polnjenje ABSS



Komplet

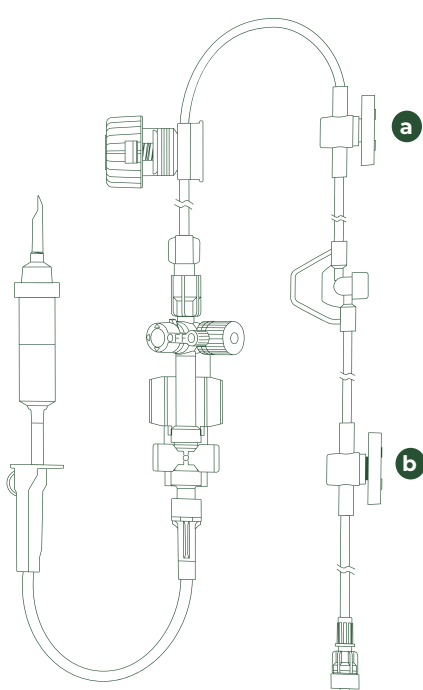

1 Napolnite komplet za merjenje tlaka.

Rezervoar



2 Med polnjenjem počasi odvijte rezervoar za 3/4 obrata (270°) in ga ponovno obrnite nazaj.



Vzorčevalni priključek




3 Napolnite vzorčevalni priključek do konca in odstranite vse zračne mehurčke.

II. Odvzem krvi ABSS



1 Razkužite mesto odvzema. Upoštevajte čas delovanja!

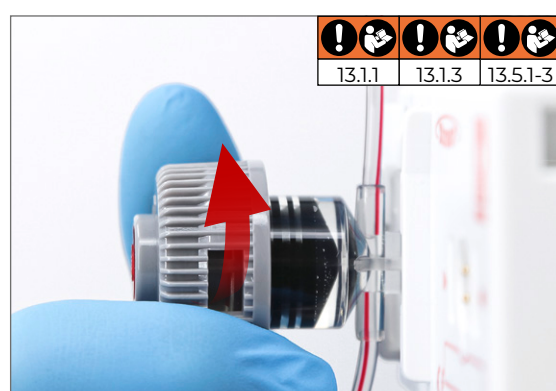

2 Rezervoar počasi popolnoma odprite tako, da ga obrnete v nasprotni smeri urinega kazalca.



3 Zaprite 1-potni ventil.



4 Posodo za odvzem (brizgo) spojite z adapterjem za odvzem.



5 Preluknjajte adapter za odvzem, vključno z posodo za odvzem.



6 Odvzemite vzorec krvi.



7 Zaprite 1-potni ventil.




8 Odstranite adapter za odvzem s posodo za odvzem.




9 Razkužite mesto odvzema.

III. Reinfuzija in spiranje

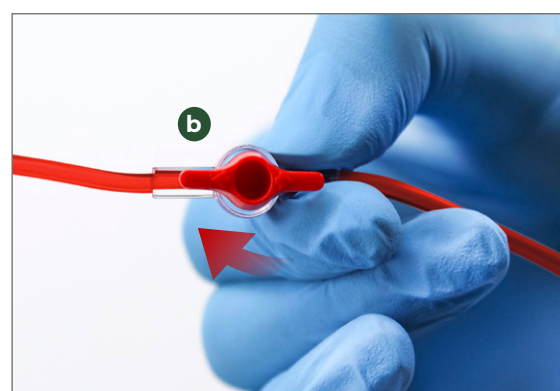


1 Odprite 1-potni ventil.

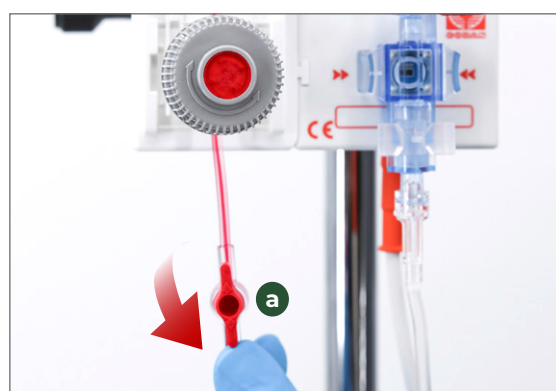

2 Odprite 1-potni ventil.



3 Počasi obrnite rezervoar popolnoma nazaj v smeri urinega kazalca.

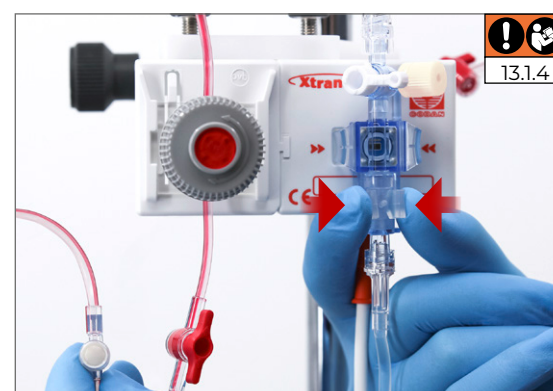

4 Sperite ABSS.



5 Kontrola: Preverite merjenje tlaka in prikaz na monitorju.



Ta Quick Guide vas obvešča o najpomembnejših korakih in ne nadomešča upoštevanja navodil za uporabo. Obvezno upoštevajte informacije o predvideni uporabi ter opozorila in varnostne napotke v navodilih za uporabo. Napotki v korakih se nanašajo na pripadajoče poglavje in ustrezna opozorila v navodilih za uporabo. V primeru neupoštevanja/neskladnosti obstajajo znatna varnostna tveganja za pacienta, uporabnika in tretje osebe. Upoštevajte higienske smernice vaše ustanove.

