
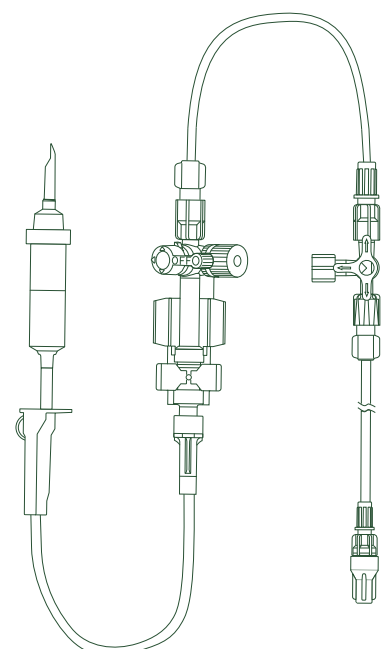
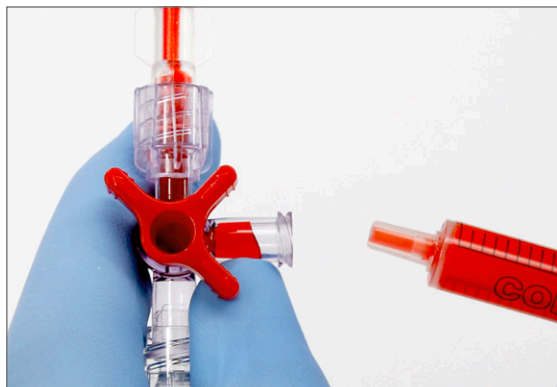


I. Förberedelse / påfyllning CLC

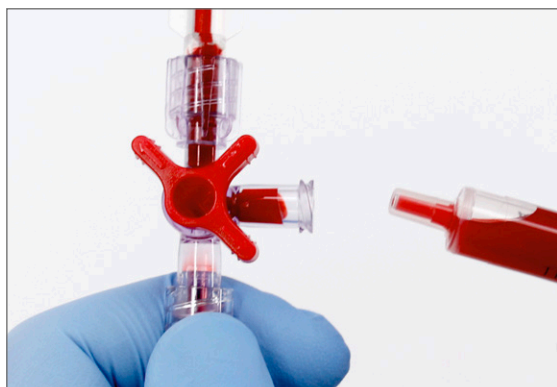

Set	Classic Blood Sampling System				Set
					
1 Fyll på tryckmätningssätet.	2 Vrid fyrvägskranen till läget för spolning.	3 Fyll på fyrvägskranen helt.	4 Skruva på den nya oventilerade ändkåpan/kombikåpan.	5 Vrid fyrvägskranen till läget för tryckmätning.	6 Fyll på tryckmätningssätet helt.

II. Blodprovstagning CLC

				
1 Ta bort ändkåpan/kombikåpan och bortskaffa den.	2 Anslut provtagningsbehållaren ordentligt.	3 Vrid fyrvägskranen till läget för provtagning.	4 Dra upp utspätt blod.	5 Vrid fyrvägskranen till 45°-läge.
				
6 Koppla från provtagningsbehållaren och bortskaffa den.	7 Anslut den nya provtagningsbehållaren ordentligt.	8 Vrid fyrvägskranen till läget för provtagning.	9 Dra upp blodprovet.	10 Vrid fyrvägskranen till 45°-läge.
				
11 Koppla från provtagningsbehållaren med rent blod.	12 Vrid fyrvägskranen till läget för spolning.			

III. Spolning

				
1 Spola tills det inte finns några rester i fyrvägskranen.	2 Skruva på den nya oventilerade ändkåpan/kombikåpan.	3 Vrid fyrvägskranen till läget för tryckmätning.	4 Spola tryckmätningssätet.	5 Kontroll: Kontrollera tryckmätning och indikering på monitor.



Denna Quick Guide innehåller information om de viktigaste stegen och ersätter inte bruksanvisningen. Följ alltid all information om avsedd användning samt varnings- och säkerhetsanvisningarna i bruksanvisningen. Instruktionerna gäller tillhörande kapitel och respektive varningar i bruksanvisningen. Vid underlåtenhet att göra detta föreligger betydande säkerhetsrisker för patient, användare och tredje part. Beakta hygienriktlinjerna på din klinik.