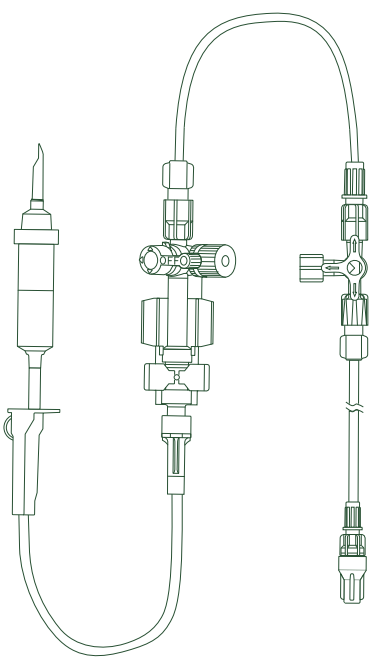
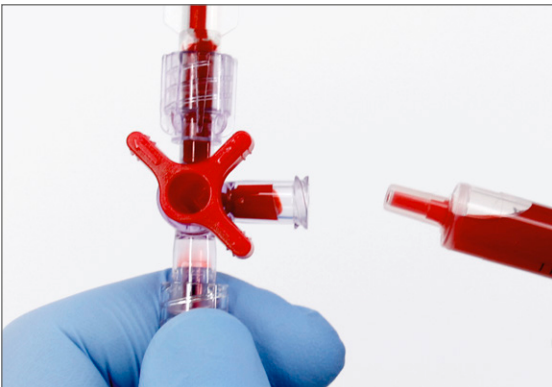


I. Подготовка / Пълнене CLC

Сет	Classic Blood Sampling System				Сет	
						
	1 Напълнете комплекта за измерване на налягане.	2 Поставете 4-пътното кранче в положение за промиване.	3 Напълнете изцяло 4-пътното кранче.	4 Завийте нова невентилирана крайна/комбинирана капачка.	5 Поставете 4-пътното кранче в положение за измерване на налягане.	6 Напълнете изцяло комплекта за измерване на налягане.

II. Вземане на кръвна проба CLC

				
1 Отстранете и изхвърлете крайната/комбинираната капачка.	2 Свържете неподвижно контейнера за вземане на проба.	3 Поставете 4-пътното кранче в положение за вземане на проба.	4 Изтеглете смесената кръв.	5 Поставете 4-пътното кранче в положение на 45°.
				
6 Разединете и изхвърлете контейнера за вземане на проба.	7 Свържете неподвижно нов контейнер за вземане на проба.	8 Поставете 4-пътното кранче в положение за вземане на проба.	9 Изтеглете кръвната проба.	10 Поставете 4-пътното кранче в положение на 45°.
				
11 Разединете контейнера за вземане на проба с чиста кръв.	12 Поставете 4-пътното кранче в положение за промиване.			

III. Промиване

				
1 Промивайте, докато бъдат отстранени остатъците от кръв от 4-пътното кранче.	2 Завийте нова невентилирана крайна/комбинирана капачка.	3 Поставете 4-пътното кранче в положение за измерване на налягане.	4 Промийте комплекта за измерване на налягане.	5 Проверка: Проверете измерването на налягане и показанието на монитора.



Quick Guide Ви дава информация относно най-важните стъпки за изпълнение на действия и не заменя спазването на инструкцията за употреба. Задължително спазвайте и следвайте информацията относно употребата по предназначение, както и предупрежденията и указанията за безопасност в инструкцията за употреба. Указанията в стъпките за изпълнение на действия се отнасят за съответната глава и съответните предупреждения в инструкцията за употреба. Ако те не бъдат спазени/следвани, съществуват значителни рискове за безопасността на пациента, потребителя и трети лица. Спазвайте хигиенните правила на Вашето заведение.