
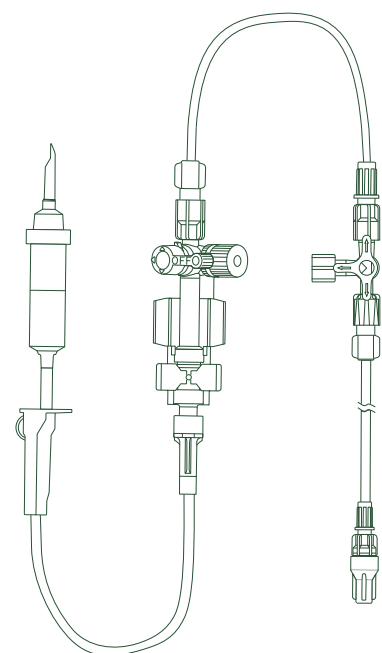
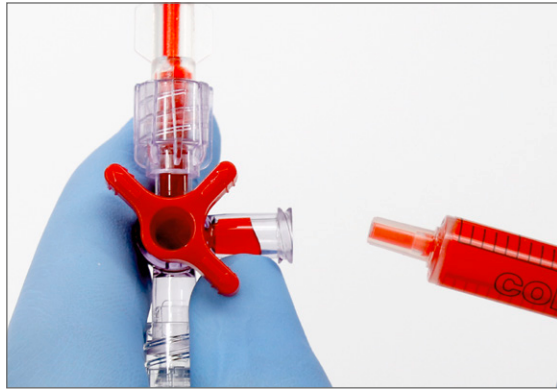
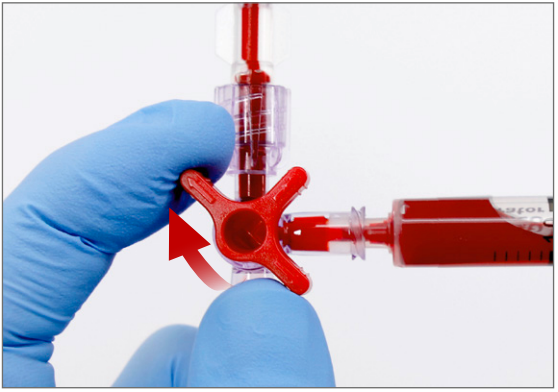


I. Előkészítés / CLC feltöltés

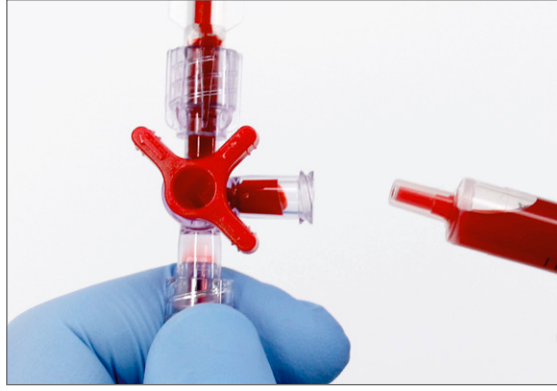

Készlet	Classic Blood Sampling System				Készlet
					
1 Töltse fel a nyomásmérő készletet.	2 Állítsa a négyutas csapot öblítő állásba.	3 Töltse fel teljesen a négyutas csapot.	4 Csavarjon fel egy új, nem szellőztetett zárósapkát/kombinált sapkát.	5 Állítsa a négyutas csapot nyomásmérő állásba.	6 Töltse fel teljesen a nyomásmérő készletet.

II. CLC vérvétel

				
1 Távolítsa el és ártalmatlanítsa a zárósapkát/kombinált sapkát.	2 Csatlakoztassa szorosan a gyűjtőedényt.	3 Állítsa a négyutas csapot levétel állásba.	4 Szívja fel a kevert vért.	5 Állítsa a négyutas csapot 45°-os állásba.
				
6 Válassza le és ártalmatlanítsa a gyűjtőedényt.	7 Csatlakoztassa szorosan az új gyűjtőedényt.	8 Állítsa a négyutas csapot levétel állásba.	9 Szívja fel a vérmintát.	10 Állítsa a négyutas csapot 45°-os állásba.
				
11 Válassza le a tiszta vérral megtöltött gyűjtőedényt.	12 Állítsa a négyutas csapot öblítő állásba.			

III. Öblítés

				
1 Öblítse addig, amíg nem marad vérmaradvány a négyutas csapban.	2 Csavarjon fel egy új, nem szellőztetett zárósapkát/kombinált sapkát.	3 Állítsa a négyutas csapot nyomásmérő állásba.	4 Öblítse ki a nyomásmérő készletet.	5 Ellenőrzés: Ellenőrizze a nyomásmérést és a megjelenítést a monitoron.



Ez a Quick Guide tájékoztatja Önt a legfontosabb lépésekről, de nem helyettesíti a használati utasítást. A rendeltetésszerű használatra vonatkozó információkat, valamint a használati utasításban szereplő figyelmeztetéseket és biztonsági utasításokat feltétlenül vegye figyelembe és tartsa be. A lépésekben szereplő utasítások a megfelelő fejezetre és a használati utasításban szereplő megfelelő figyelmeztetésekre hivatkoznak. Ezek figyelmen kívül hagyása/megszegése jelentős biztonsági kockázatokkal jár a beteg, a felhasználó és harmadik felek számára. Tartsa be a létesítmény higiéniai irányelveit.