

CODAN

IBPM

DPT-6000


(DPT-6003 & DPT-6009)

DPT-9000/Xtrans®

(DPT-9003 & DPT-9009)

Quick Guide

Prélèvement sanguin avec
SWAN Switch –
Blood Sampling System

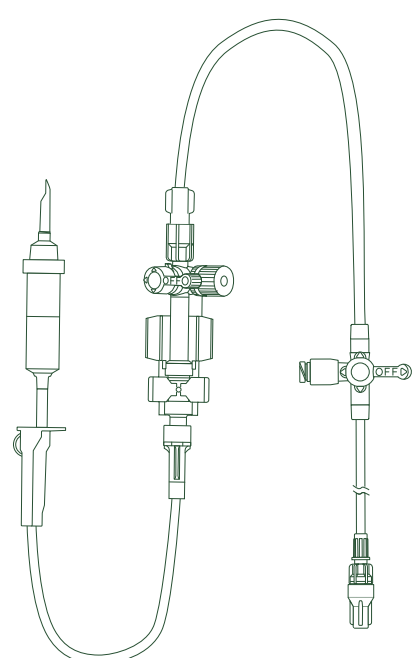

I. Préparation / Remplissage du SWAN Switch

SWAN Switch



1 Purger entièrement le set de mesure de pression et le SWAN Switch en éliminant toutes les bulles d'air.



2 Mettre le SWAN Switch en position de mesure de pression.

II. Prélèvement sanguin avec un SWAN Switch

* Il est recommandé d'utiliser pour cela des **systèmes Luer-Lock verrouillables**.
Si l'on emploie des **systèmes Luer-Slip**, veiller à les brancher avec beaucoup de précaution sur la sortie latérale en effectuant une **rotation de 90°**.

13.4.5



1 Désinfecter le site de prélèvement. Respecter la durée d'action !



2 Fixer la seringue de prélèvement. *



3 Mettre le SWAN Switch en position de prélèvement. *



4 Aspiration du mélange de sang. *



5 Mettre le SWAN Switch en position de mesure de pression. *



6 Déconnecter la seringue de prélèvement et l'éliminer. *



7 Connecter la nouvelle seringue de prélèvement. *



8 Mettre le SWAN Switch en position de prélèvement. *



9 Aspirer l'échantillon de sang. *



10 Mettre le SWAN Switch en position de mesure de pression. *



11 Déconnecter la seringue de prélèvement avec le sang pur. *



12 Désinfecter le site de prélèvement. Respecter la durée d'action !

III. Rinçage



1 Mettre le SWAN Switch en position de rinçage.



2 Rincer le SWAN Switch.



3 Mettre le SWAN Switch en position de mesure de pression.



4 Contrôle : Vérifier la mesure de la pression et l'affichage sur le moniteur.



Le présent Quick Guide vous informe sur les principaux gestes à effectuer, mais ne remplace pas l'étude de la notice d'utilisation. Il convient d'observer et de suivre impérativement les informations relatives à l'utilisation conforme à la destination prévue ainsi que les mises en garde et les consignes de sécurité stipulées dans la notice d'utilisation. Les remarques concernant les différents gestes se rapportent au chapitre correspondant et aux mises en garde respectives de la notice d'utilisation. Le non-respect ou la non-observation de ces consignes comporte des risques considérables pour la sécurité du patient, de l'utilisateur et de tierces personnes. Respecter les directives de l'établissement en matière d'hygiène.