

I. Preparazione / riempimento SWAN Switch

SWAN Switch



1 Riempire completamente e senza formare bolle d'aria il set per la misurazione della pressione e lo SWAN Switch.



2 Mettere SWAN Switch nella posizione di misurazione della pressione.

II. Prelievo di sangue SWAN Switch

Per l'impiego sono consigliati sistemi **Luer-Lock bloccanti**. In caso di utilizzo di sistemi **Luer-Slip**, è necessario assicurarsi che questi siano collegati con molta attenzione e con una **rotazione di 90°** sull'uscita laterale.




1 Collegare saldamente il contenitore di raccolta.



2 Mettere SWAN Switch nella posizione di prelievo.



3 Prelevare il sangue misto.

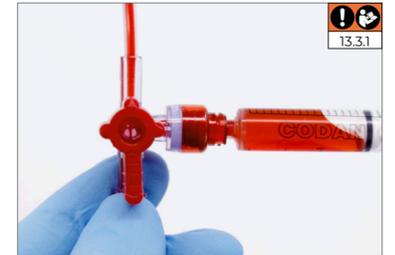

4 Mettere SWAN Switch nella posizione di misurazione della pressione.



5 Scollegare e smaltire il contenitore di raccolta.



6 Collegare saldamente il nuovo contenitore di raccolta.



7 Mettere SWAN Switch nella posizione di prelievo.



8 Prelevare il campione di sangue.



9 Mettere SWAN Switch nella posizione di misurazione della pressione.



10 Scollegare il contenitore di raccolta con sangue puro.



11 Disinfettare il punto di prelievo. Rispettare il tempo di esposizione!



12 Disinfettare il punto di prelievo. Rispettare il tempo di esposizione!

III. Lavare



1 Mettere SWAN Switch nella posizione di lavaggio.



2 Lavare SWAN Switch.



3 Mettere SWAN Switch nella posizione di misurazione della pressione.



4 Controllo: Verificare la misurazione della pressione e le indicazioni sul monitor.



Questa Quick Guide serve a informare gli utilizzatori sui passaggi importanti, ma non sostituisce l'osservanza delle istruzioni per l'uso. È indispensabile osservare e seguire le informazioni relative all'uso previsto, nonché le avvertenze e le istruzioni di sicurezza contenute nelle istruzioni per l'uso. Le istruzioni sui passaggi fanno riferimento al capitolo corrispondente e alle rispettive avvertenze nelle istruzioni per l'uso. L'inosservanza delle indicazioni può comportare notevoli rischi per la sicurezza del paziente, dell'utilizzatore e di terzi. Osservare le linee guida igieniche della struttura sanitaria.