



I. Preparazione / riempimento SWAN Switch

SWAN Switch



1 Riempire completamente e senza formare bolle d'aria il set per la misurazione della pressione e lo SWAN Switch.



2 Mettere SWAN Switch nella posizione di misurazione della pressione.

II. Prelievo di sangue SWAN Switch

* Per l'impiego sono consigliati sistemi **Luer-Lock bloccanti**. In caso di utilizzo di sistemi **Luer-Slip**, è necessario assicurarsi che questi siano collegati con molta attenzione e con una **rotazione di 90°** sull'uscita laterale.



1 Disinfettare il punto di prelievo. Rispettare il tempo di esposizione!*



2 Collegare saldamente il contenitore di raccolta.*



3 Mettere SWAN Switch nella posizione di prelievo.*



4 Prelevare il sangue misto.*



5 Mettere SWAN Switch nella posizione di misurazione della pressione.*



6 Scollegare e smaltire il contenitore di raccolta.*



7 Collegare saldamente il nuovo contenitore di raccolta.*



8 Mettere SWAN Switch nella posizione di prelievo.*



9 Prelevare il campione di sangue.*



10 Mettere SWAN Switch nella posizione di misurazione della pressione.*



11 Scollegare il contenitore di raccolta con sangue puro.*



12 Disinfettare il punto di prelievo. Rispettare il tempo di esposizione!*

III. Lavare



1 Mettere SWAN Switch nella posizione di lavaggio.



2 Lavare SWAN Switch.



3 Mettere SWAN Switch nella posizione di misurazione della pressione.



4 Controllo: Verificare la misurazione della pressione e le indicazioni sul monitor.



Questa Quick Guide serve a informare gli utilizzatori sui passaggi importanti, ma non sostituisce l'osservanza delle istruzioni per l'uso. È indispensabile osservare e seguire le informazioni relative all'uso previsto, nonché le avvertenze e le istruzioni di sicurezza contenute nelle istruzioni per l'uso. Le istruzioni sui passaggi fanno riferimento al capitolo corrispondente e alle rispettive avvertenze nelle istruzioni per l'uso. L'inosservanza delle indicazioni può comportare notevoli rischi per la sicurezza del paziente, dell'utilizzatore e di terzi. Osservare le linee guida igieniche della struttura sanitaria.