




I. Förberedelse / påfyllning SWAN Switch

SWAN Switch

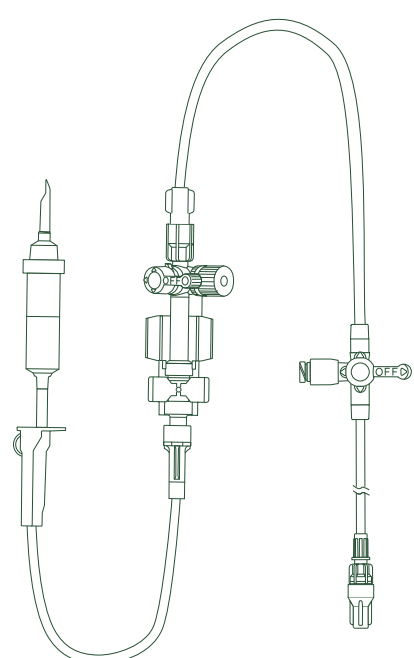

1 Fyll på tryckmätningssätet och SWAN Switch helt och utan bubblor.




2 Vrid SWAN Switch till läget för tryckmätning.

II. Blodprovstagning SWAN Switch

För användningen rekommenderas låsbara **luer-locksystem**. Säkerställ vid användning av **luer-slipsystem** att dessa ansluts mycket försiktigt och **vridna 90°** vid sidoöppningen.



1 Anslut provtagningsbehållaren ordentligt.

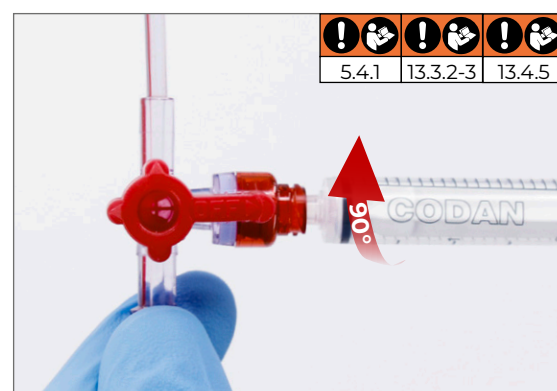

2 Vrid SWAN Switch till läget för provtagning.



3 Dra upp utspädd blod.



4 Vrid SWAN Switch till läget för tryckmätning.



5 Koppla från provtagningsbehållaren och bortskaffa den.



6 Anslut den nya provtagningsbehållaren ordentligt.



7 Vrid SWAN Switch till läget för provtagning.



8 Dra upp blodprovet.



9 Vrid SWAN Switch till läget för tryckmätning.



10 Koppla från provtagningsbehållaren med rent blod.



11 Desinficera provtagningsporten. Beakta verkningstiden!



12 Desinficera provtagningsporten. Beakta verkningstiden!

III. Spolning



1 Vrid SWAN Switch till läget för spolning.



2 Spola SWAN Switch.



3 Vrid SWAN Switch till läget för tryckmätning.



4 Kontroll: Kontrollera tryckmätning och indikering på monitor.



Denna Quick Guide innehåller information om de viktigaste stegen och ersätter inte bruksanvisningen. Följ alltid all information om avsedd användning samt varnings- och säkerhetsanvisningarna i bruksanvisningen. Instruktionerna gäller tillhörande kapitel och respektive varningar i bruksanvisningen. Vid underlåtenhet att göra detta föreligger betydande säkerhetsrisker för patient, användare och tredje part. Beakta hygienriktlinjerna på din klinik.