



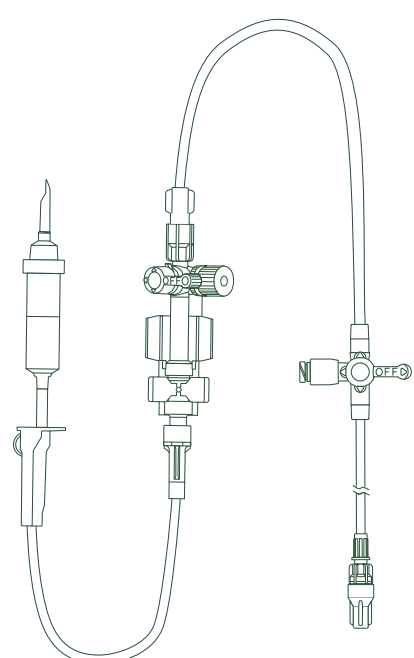

I. Forberedelse / fylling SWAN Switch

SWAN Switch

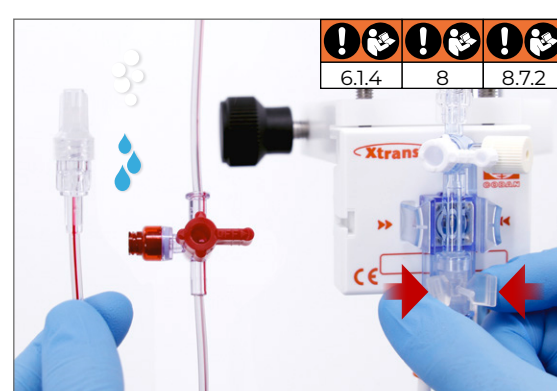

1 Fyll trykkmåleren og SWAN Switch fullstendig og uten bobler.



2 Sett SWAN Switch i trykkmålingsposisjon.

II. Blodprøvetaking SWAN Switch

Til dette anbefaler vi låsbare **Luer-lock-systemer**. Ved bruk av **Luer-slip-systemer** må du passe på at de kobles til svært forsiktig og med en **90°-dreibevegelse** på sideutgangen.

13.4.5



1 Koble til prøvetakingsbeholderen.



2 Sett SWAN Switch i prøvetakingsposisjon.



3 Trekk opp blandingsblod.



4 Sett SWAN Switch i trykkmålingsposisjon.



5 Koble fra og kast prøvetakingsbeholderen.



6 Koble til ny prøvetakingsbeholder.



7 Sett SWAN Switch i prøvetakingsposisjon.



8 Uttak av blodprøven.



9 Sett SWAN Switch i trykkmålingsposisjon.



10 Koble fra prøvetakingsbeholderen med rent blod.



11 Desinfiser prøvetakingsstedet. Ta hensyn til virketiden!



12 Desinfiser prøvetakingsstedet. Ta hensyn til virketiden!

III. Spyle



1 Sett SWAN Switch i skylleposisjon.



2 Skyll SWAN Switch.



3 Sett SWAN Switch i trykkmålingsposisjon.



4 Kontroll: Kontroller trykkmålingen og visningen på skjermen.



Denne Quick Guide inneholder kort informasjon om de viktigste handlingstrinnene og erstatter ikke bruksanvisningen. Les og følg informasjonen om forskriftsmessig bruk samt advarsler og sikkerhetsinformasjon i bruksanvisningen. Informasjonen i handlingstrinnene tar utgangspunkt i tilhørende kapittel inkludert advarsler i bruksanvisningen. Dersom den ikke følges, er det stor sikkerhetsrisiko for pasient, bruker og tredjepart. Følg hygieneretningslinjene som gjelder på din institusjon.