



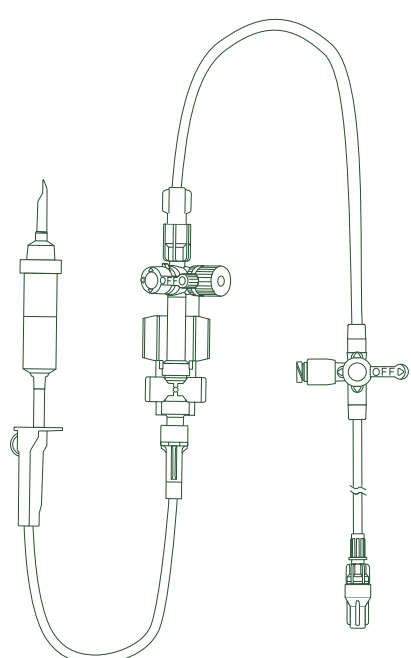

## I. Voorbereiden / vullen SWAN Switch

### SWAN Switch

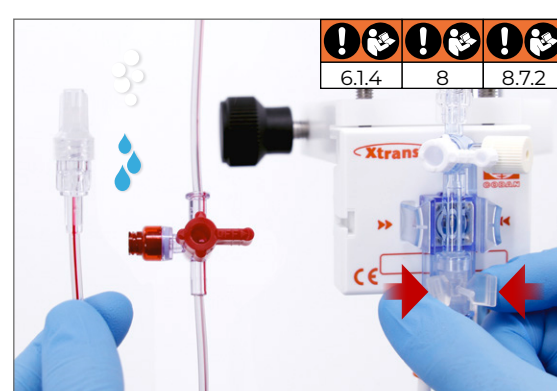

1 Vul drukmetingset en SWAN Switch volledig en zonder luchtbelletjes.



2 Zet de SWAN Switch in drukmeetstand.

## II. Bloedafname SWAN Switch

Voor de toepassing worden vergrendelbare **Luer-locksystemen** aanbevolen. Bij gebruik van **Luer-slipsystemen** moet erop worden gelet dat deze heel voorzichtig en met een draai van 90° op de zij-uitgang worden aangesloten.



1 Sluit de afnamecontainer goed aan.



2 Zet de SWAN Switch in afnamestand.



3 Trek het gemengde bloed op.



4 Zet de SWAN Switch in drukmeetstand.



5 Ontkoppel de afnamecontainer en verwijder deze als afval.



6 Sluit de nieuwe afnamecontainer goed aan.



7 Zet de SWAN Switch in afnamestand.



8 Trek het bloedmonster op.



9 Zet de SWAN Switch in drukmeetstand.



10 Ontkoppel de afnamecontainer met zuiver bloed.



11 Desinfecteer de afnameplek. Let op de inwerktijd!



12 Desinfecteer de afnameplek. Let op de inwerktijd!

## III. Spoelen



1 Zet de SWAN Switch in spoelstand.



2 Spoel de SWAN Switch.



3 Zet de SWAN Switch in drukmeetstand.



4 Controle: controleer drukmeting & aanduiding op de monitor.



Deze Quick Guide informeert u over de belangrijkste handelingsschappen en is geen vervanging voor de inachtneming van de gebruiksaanwijzing. U dient de informatie over het beoogde gebruik evenals de waarschuwingen en veiligheidsaanwijzingen in de gebruiksaanwijzing absoluut in acht te nemen en op te volgen. De aanwijzingen in de handelingsschappen hebben betrekking op het bijbehorende hoofdstuk en de desbetreffende waarschuwingen in de gebruiksaanwijzing. Als deze aanwijzingen niet in acht genomen/opgevolgd worden, bestaan er aanzienlijke veiligheidsrisico's voor patiënten, gebruikers en derden. Neem goed nota van de hygiënevoorschriften van uw instelling.