




I. Klargøring / påfyldning SWAN Switch

SWAN Switch

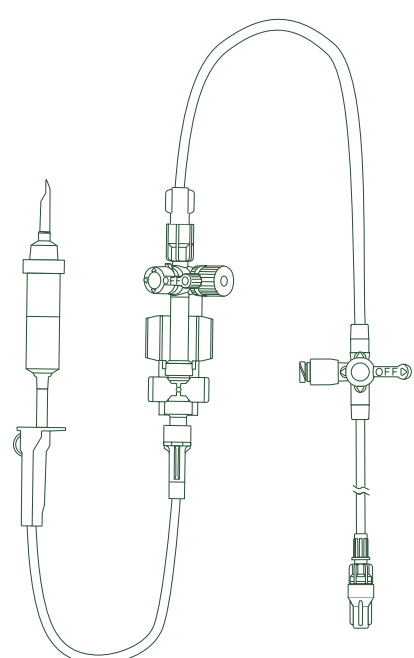

1 Påfyld trykmålesæt og SWAN Switch komplet og boblefrit.




2 Placér SWAN Switch i trykmålepositionen.

II. Blodprøvetagning SWAN Switch

Der anbefales brug af **Luer-Lock-systemer**, der kan låses. Ved brug af **Luer-Slip-systemer** skal man være opmærksom på, at de tilsluttes meget forsigtigt og med en **90°-drejning** på sideudgangen.



1 Tilslut beholderen fast.

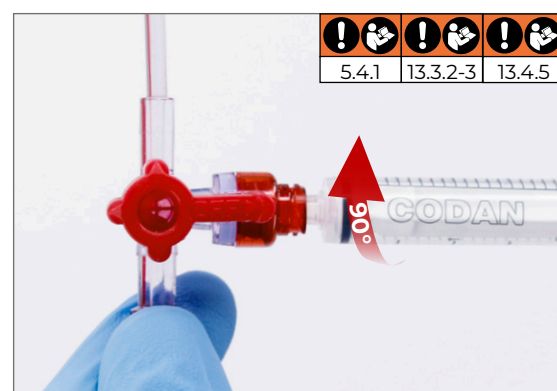

2 Placér SWAN Switch i prøvetagningspositionen.



3 Optræk blandingsblodet.



4 Placér SWAN Switch i trykmålepositionen.



5 Frakobl og bortskaf beholderen.



6 Tilslut en ny beholder fast.



7 Placér SWAN Switch i prøvetagningspositionen.



8 Optræk blodprøven.



9 Placér SWAN Switch i trykmålepositionen.



10 Frakobl beholderen med rent blod.



11 Desinficér prøvetagningsstedet. Overhold kontakttiden!



12 Desinficér prøvetagningsstedet. Overhold kontakttiden!

III. Skylning



1 Placér SWAN Switch i skyllepositionen.



2 Skyl SWAN Switch.



3 Placér SWAN Switch i trykmålepositionen.



4 Kontrol: Kontrollér trykmålingen og visningen på monitoren.



Denne Quick Guide informerer dig om de vigtigste handlingstrin og erstatter ikke overholdelsen af brugsanvisningen. Overhold og følg altid oplysningerne om den tilsluttede brug samt advarslerne og sikkerhedsanvisningerne i brugsanvisningen. Anvisningerne i handlingstrinnene refererer til det tilhørende kapitel og de pågældende advarsler i brugsanvisningen. Ved tilsidesættelse/overtrædelse er der alvorlige sikkerhedsrisici for patienten, brugeren og tredjemand. Overhold hygiejneretningslinjerne på dit hospital.