



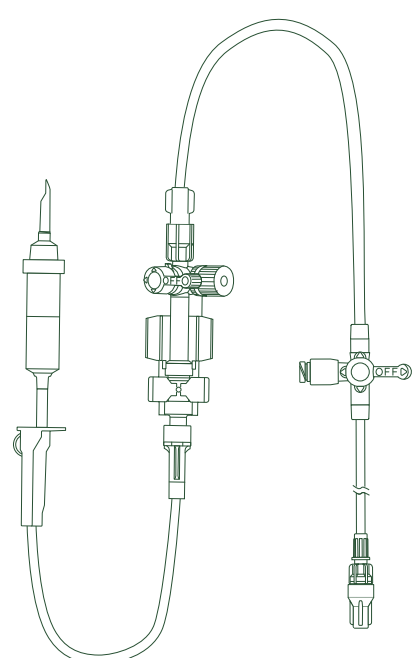

I. Priprema / punjenje sustava SWAN Switch

SWAN Switch

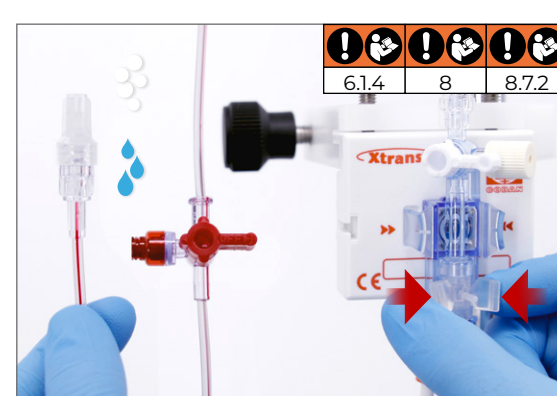

1 Set za mjerenje tlaka i SWAN prekidač napunite u cijelosti i tako da nema mjehurića.



2 Stavite SWAN prekidač u položaj za mjerenje tlaka.

II. Sustav za uzimanje uzorka krvi SWAN Switch

Za upotrebu se preporučuju **sustavi luer lock** koji se mogu zaključati. Pri upotrebi **sustava luer-slip** pazite na to da se oni spajaju na bočni odvojak vrlo pažljivo i uz **okretanje od 90°**.



1 Čvrsto spojite spremnik za uzimanje uzorka krvi.



2 Stavite SWAN prekidač u položaj za uzimanje uzorka.



3 Povucite miješanu krv.



4 Stavite SWAN prekidač u položaj za mjerenje tlaka.



5 Odspojite i zbrinite spremnik za uzimanje uzorka krvi.



6 Čvrsto spojite novi spremnik za uzimanje uzorka krvi.



7 Stavite SWAN prekidač u položaj za uzimanje uzorka.



8 Povucite uzorak krvi.



9 Stavite SWAN prekidač u položaj za mjerenje tlaka.



10 Odspojite spremnik za uzimanje uzorka s čistom krvi.



11 Dezinficirajte mjesto uzimanja uzorka. Obratite pozornost na vrijeme djelovanja!



12 Dezinficirajte mjesto uzimanja uzorka. Obratite pozornost na vrijeme djelovanja!

III. Ispiranje



1 Stavite SWAN prekidač u položaj za ispiranje.



2 Isperite SWAN prekidač.



3 Stavite SWAN prekidač u položaj za mjerenje tlaka.



4 Kontrola: Provjerite mjerenje tlaka i prikaz na monitoru.



Ove kratke upute („Quick Guide“) informativno će vas o najvažnijim koracima u postupanju i ne zamjenjuju poštovanje uputa za uporabu. Obavezno uvažite i primjenjujte informacije o namjenskoj uporabi kao i upozorenja te sigurnosne upute iz uputa za uporabu. Upute u koracima za postupanje odnose se na pripadajuće poglavlje i pojedina upozorenja iz uputa za uporabu. Ako se ne poštuju ili ne slijede upute, postoje značajni sigurnosni rizici za pacijenta, korisnika i treće osobe. Pridržavajte se higijenskih smjernica svoje ustanove.