




I. Priprava / polnjenje SWAN Switch

SWAN Switch

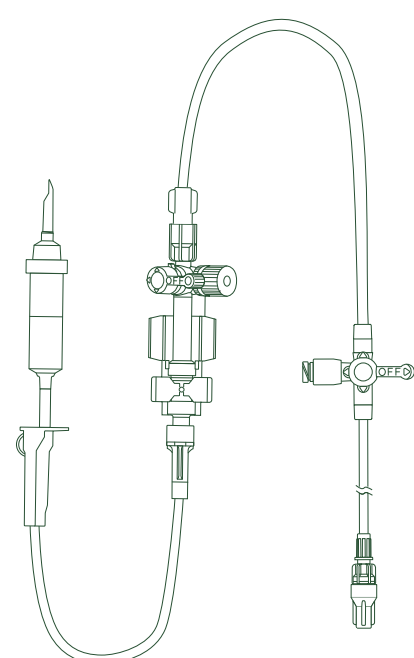

1 Komplet za merjenje tlaka in stikalo SWAN popolnoma in brez mehurčkov napolnite.



2 Stikalo SWAN namestite v položaj za merjenje tlaka.

II. Odvzem krvi s stikalom SWAN Switch

Za uporabo so priporočljivi **sistemi Luer-Lock**, ki jih je mogoče zakleniti. Pri uporabi sistemov **nastavkov Luer-Slip** je treba paziti, da se le-ti zelo previdno in z **obračanjem za 90°** priključijo na stranski izhod.



1 Posodo za odvzem trdno priklopite.




2 Stikalo SWAN namestite v položaj za odvzem.



3 Odvzimate mešano kri.



4 Stikalo SWAN namestite v položaj za merjenje tlaka.

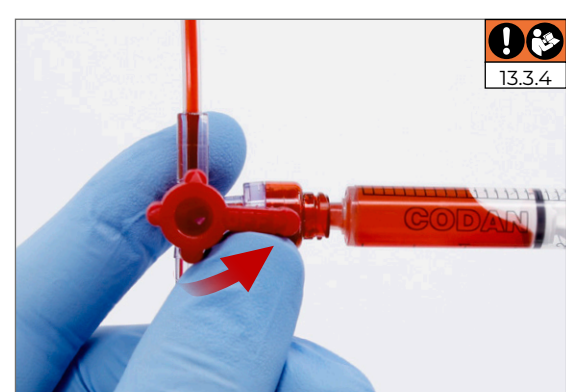

5 Odklopite in zavrzite posodo za odvzem.



6 Novo posodo za odvzem trdno priklopite.



7 Stikalo SWAN namestite v položaj za odvzem.



8 Odvzimate vzorec krvi.



9 Stikalo SWAN namestite v položaj za merjenje tlaka.



10 Odstranite posodo za odvzem s čisto krvjo.



11 Razkužite mesto odvzema. Upoštevajte čas delovanja!



12 Razkužite mesto odvzema. Upoštevajte čas delovanja!

III. Spiranje



1 Stikalo SWAN namestite v položaj za spiranje.



2 Sperite stikalo SWAN.



3 Stikalo SWAN namestite v položaj za merjenje tlaka.



4 Kontrola: Preverite merjenje tlaka in prikaz na monitorju.



Ta Quick Guide vas obvešča o najpomembnejših korakih in ne nadomešča upoštevanja navodil za uporabo. Obvezno upoštevajte informacije o predvideni uporabi ter opozorila in varnostne napotke v navodilih za uporabo. Napotki v korakih se nanašajo na pripadajoče poglavje in ustrezna opozorila v navodilih za uporabo. V primeru neupoštevanja/heskladnosti obstajajo znatna varnostna tveganja za pacienta, uporabnika in tretje osebe. Upoštevajte higienske smernice vaše ustanove.