
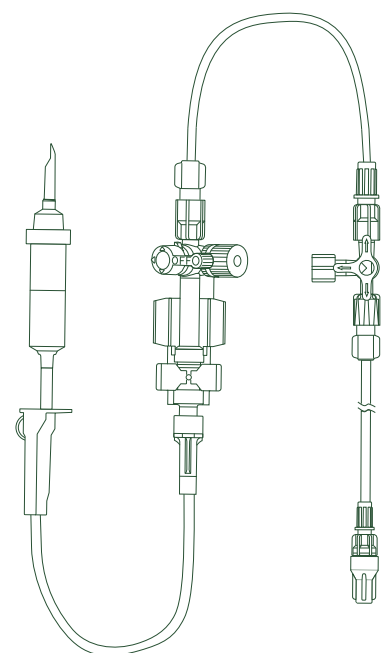


I. Príprava / plnenie CLC

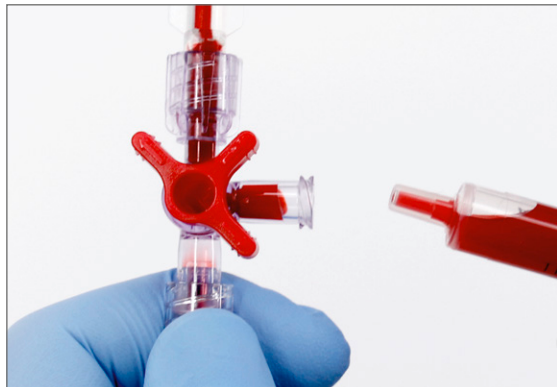


Súprava	Classic Blood Sampling System				Súprava
					
1 Naplňte súpravu na meranie tlaku.	2 Prestavte 4-cestný kohút do polohy preplachovania.	3 Úplne naplňte 4-cestný kohút.	4 Odskrutkujte nový neventilovaný koncový/kombinovaný uzáver.	5 Prestavte 4-cestný kohút do polohy merania tlaku.	6 Úplne naplňte súpravu na meranie tlaku.

II. Odber krvi CLC

				
1 Odstráňte a zlikvidujte koncový/kombinovaný uzáver.	2 Pevne pripojte odbernú nádobku.	3 Prestavte 4-cestný kohút do polohy odberu.	4 Natiahnite zmiešanú krv.	5 Prestavte 4-cestný kohút do polohy 45°.
				
6 Odpojte a zlikvidujte odbernú nádobku.	7 Pevne pripojte novú odbernú nádobku.	8 Prestavte 4-cestný kohút do polohy odberu.	9 Natiahnite vzorku krvi.	10 Prestavte 4-cestný kohút do polohy 45°.
				
11 Odpojte odbernú nádobku s plnou krvou.	12 Prestavte 4-cestný kohút do polohy preplachovania.			

III. Preplachovanie

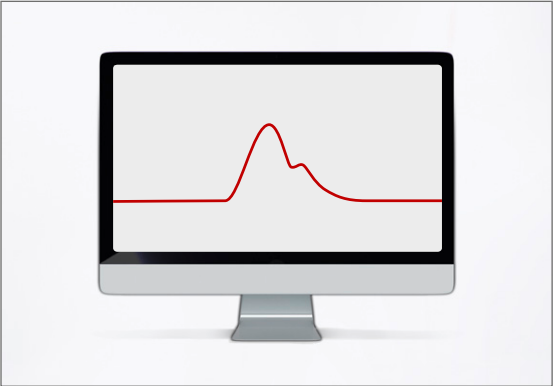				
1 Preplachujte, kým sa zo 4-cestného kohúta neodstráni zvyšky krvi.	2 Odskrutkujte nový neventilovaný koncový/kombinovaný uzáver.	3 Prestavte 4-cestný kohút do polohy merania tlaku.	4 Prepláchnite súpravu na meranie tlaku.	5 Kontrola: Skontrolujte meranie tlaku a indikáciu na monitore.



Táto stručná príručka (Quick Guide) obsahuje najdôležitejšie pracovné kroky a nenahrádza dodržiavanie návodu na použitie. Bezpodmienečne rešpektujte a dodržiavajte informácie o zamýšľanom použití, ako aj upozornenia a bezpečnostné pokyny v návode na použitie. Upozornenia v pracovných krokoch sa vzťahujú na príslušnú kapitolu a príslušné upozornenia v návode na použitie. V prípade nerespektovania/nedodržania hrozia značné bezpečnostné riziká pre pacienta, používateľa a tretie strany. Dodržiavajte hygienické smernice vášho zariadenia.