


I. Príprava / plnenie ABSS

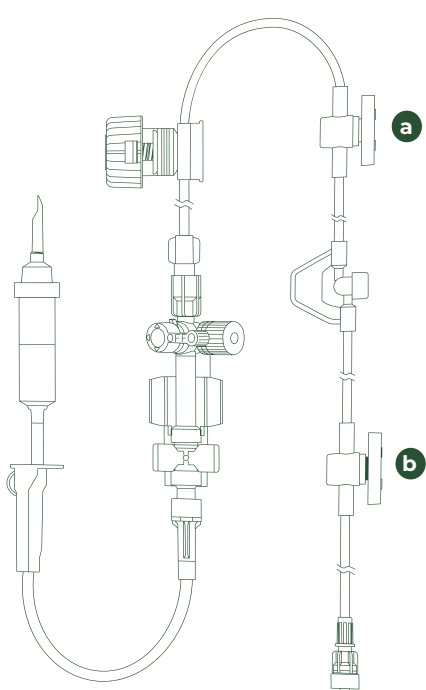

Súprava



1 Naplňte súpravu na meranie tlaku.

Rezervoár



2 Počas plnenia pomaly odskrutkujte rezervoár o 3/4 otáčky (270°) a opäť ho zaskrutkujte.



Odberový port




3 Naplňte odberový port doplna a bez vzduchových bublín.

II. Odber krvi ABSS



1 Dezinfikujte odberné miesto. Dodržte dobu pôsobenia!

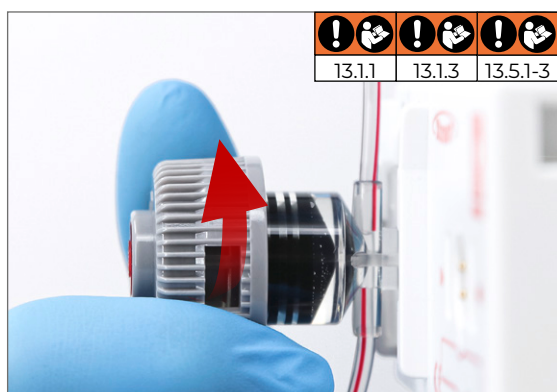

2 Rezervoár pomaly úplne odskrutkujte otáčaním doľava.



3 Zatvorte 1-cestný kohút.



4 Pripojte odbernú nádobku k odbernému adaptéru.



5 Prepichnete odberný adaptér vrátane odbernej nádobky.



6 Natiahnite vzorku krvi.



7 Zatvorte 1-cestný kohút.




8 Odstráňte odberný adaptér s odbernou nádobkou.




9 Dezinfikujte odberné miesto.


III. Reinfúzia a preplachovanie

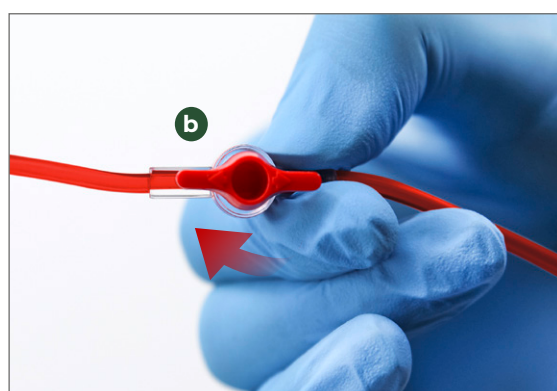


1 Otvorte 1-cestný kohút.

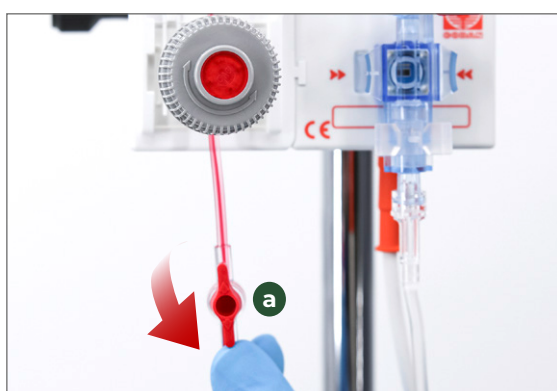

2 Otvorte 1-cestný kohút.

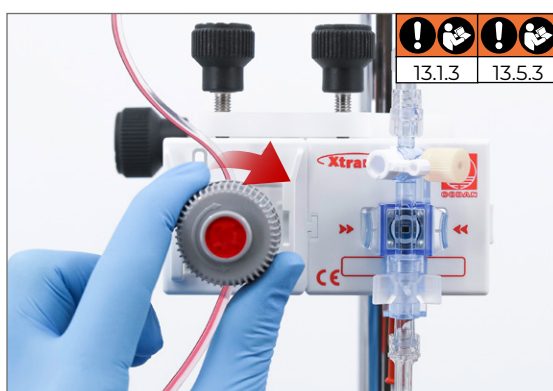

3 Rezervoár pomaly úplne zaskrutkujte otáčaním doprava.

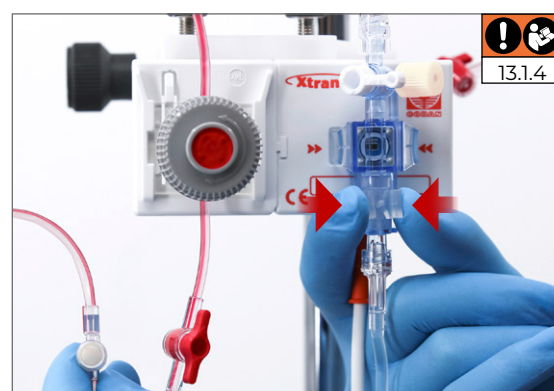

4 Prepláchnite ABSS.



5 Kontrola: Skontrolujte meranie tlaku a indikáciu na monitore.



Táto stručná príručka (Quick Guide) obsahuje najdôležitejšie pracovné kroky a nenahrádza dodržiavanie návodu na použitie. Bezpodmienečne rešpektujte a dodržiavajte informácie o zamýšľanom použití, ako aj upozornenia a bezpečnostné pokyny v návode na použitie. Upozornenia v pracovných krokoch sa vzťahujú na príslušnú kapitolu a príslušné upozornenia v návode na použitie. V prípade nerešpektovania/nedodržania hrozia značné bezpečnostné riziká pre pacienta, používateľa a tretie strany. Dodržiavajte hygienické smernice vášho zariadenia.

